

Hi-MUPRO Oral Jel Kullanım Talimatı

Mukoadezif Yara Koruma (Steril Değildir)

İçindekiler:

- Saf su
- Polivinilpirolidon K-90
- Kalsiyum klorür
- Potasyum sorbat
- Propilen glikol

Endikasyonlar: Hi-MUPRO Oral Jel, ağız mukozasına yapışarak mekanik bir etki gösterir. Çeşitli nedenlerden kaynaklanan ağız yaralarının ağrı ve tedavisine destek olur. Aşağıdaki durumlarda kullanımı önerilir:

- Oral mukozit / stomatit (kemoterapi veya radyoterapi nedeniyle oluşabilir)
- Ağız cerrahisi sonrası tahriş
- Diş telleri veya uyumsuz protezlerden kaynaklanan travmatik ülserler
- Hastalıklara bağlı aftöz ülserler

Yan Etkiler: Hi-MUPRO Oral Jel'in klinik denemelerinde herhangi bir yan etki rapor edilmemiştir. Ağızda yanma hissi oluşması normaldir.

Kullanım Talimatları:

Sprey:

- Spreyi ağızdaki yara bölgesine 3 ila 5 kez püskürtün.

Gargara:

- Ağızdaki yaralı bölgeye doğrudan uygulayın.
- 10-15 mL ürünü ağızınıza alın, yaralı bölgeyi en az 30 saniye boyunca çalkalayın.
- Gargara yaparak tükürün.

Günlük Kullanım:

- Günde 3 kez veya ihtiyaç duyuldukça kullanın.
- Uygulamadan sonra en az 30 dakika boyunca bir şey yiyip içmeyin.
- 7 gün sonunda iyileşme görülmezse bir doktora danışın.

Ambalaj Seçenekleri:

Sprey: 6, 12, 30 mL şişeler

Gargara: 120, 250 mL / şişeler

Saklama Koşulları:

- Oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.
- Gargara zamanla biraz koyulaşabilir ve kıvamı yoğunlaşabilir, ancak bu etkinliği veya güvenliği etkilemez.
- Kutuda veya ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Hannox International Corp.

www.hannox.com.tw

10F-3, No. 206, Sec. 2, Nanking E. Rd., Taipei, Taiwan 10489

■ Nanosigma Biotech. Co., Ltd.

12F, No.27-6, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist., New Taipei City, Taiwan

Distribütör:

Conmax İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Varlık Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:22

Yenimahalle / ANKARA

