

NDA Plus

(Neo Dermal Activator PLUS)

Ürün Adı:

Yara bakım jeli (Tıbbi Cihaz).

Marka Adı:

NDA Plus (Neo Dermal Activator PLUS)

Ürün Açıklaması:

NDA Plus (Neo Dermal Activator PLUS), cilt yaralarını tedavi etmek için formüle edilmiş hafif sarı, viskoz bir solüsyondur. Özellikle hasar görmüş epidermis üzerinde yüzeysel yaralar için tasarlanmıştır (dermis için değildir).

İçindekiler:

Gliserol, Sodyum Hyaluronat %2, Bal, Alchemilla Vulgaris Extract, Yeşil Çay, Xanthan Gum.

Kullanım Amacı:

NDA Plus (Neo Dermal Activator PLUS), cilt bariyerinin hasar gördüğü alanlarda (örneğin ülserlerde) cildi tedavi etmek için tasarlanmıştır. Yaranın nemli kalmasını sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırır.

Uyarı ve Kullanım:

NDA Plus (Neo Dermal Activator PLUS), orta ve ağır düzeydeki cilt yaralarının tedavisinde, özellikle epiderminin zarar gördüğü durumlarda kullanılır (dermis için değildir).

- Cilt yaralarının tedavisinde, yaranın boyutuna bağlı olarak ürünü doğrudan yaraya uygulayın.
- Ürünün etkisi her kullanımda 4 ila 6 saat sürer.
- Gün de 1 ila 4 kez kullanılabilir.

Aşağıdaki durumlarda NDA Plus kullanılmamalıdır:

- Ürün bileşenlerinden birine karşı bilinen alerjik reaksiyon varsa,

- Başka bir ilaç ile yara tedavisi devam ediyorsa,
- Şişe üzerindeki son kullanma tarihi geçmişse,
- Şişe açıldıktan sonra 2 aydan uzun süre geçmişse.
- Herhangi bir alerjik reaksiyonun devam etmesi durumunda, tedaviyi durdurmanız ve tıbbi yardım almanız önerilir.
- NDA Plus'ın bilinen bir yan etkisi yoktur ve yutulması halinde güvenlidir.

Hasta Grubu

Endikasyon: Cilt bariyerinin hasar gördüğü (örneğin ülserli) alanların tedavisi için kullanılır.

Yaş Grubu: 3 yaş ve üzeri

Uygunluk: Ulusal veya bölgesel bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Durum: Ağır kanaması olmayan, aktif yara

Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:

Ürünü oda sıcaklığında saklayın.

Ürünün uygulandığı bölgeye su değmemesine özen gösterin.

Ürünü, son kullanma tarihi geçmişse, şişesi hasar görmüşse veya açıldıktan 2 ay sonra kullanmayın.


Kontrendikasyonlar:

- 3 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Ürün bileşenlerine karşı alerjisi olan kişilerde alerjik reaksiyon gelişebilir.

Nasıl Kullanılır

1) Şırınga Tipi

- A. Gerekirse, kullanımdan önce yara bölgesini temizleyin.
- B. Şırınganın üzerindeki kapağı çıkarın.
- C. Şırıngayı bastırarak ürünü yara bölgesine geniş bir şekilde uygulayın.
- D. Tam iyileşme sağlanana kadar gün de 1 ila 4 kez uygulayın.

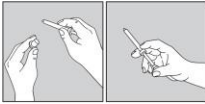

2) Pompa Tipi (itme tipi)

- Gerekirse, kullanmadan önce yara bölgesini temizleyin
- Kapağı çıkarın ve kabın kilidini açmak için pistonu alttan saat yönünün tersine çevirin.


*Kullanımdan sonra kabı kilitlemek için pistonu saat yönünde geri çevirin.

- Yara iyileşmesi tamamlanıncaya kadar günde 1 ila 4 kez uygulayın.



3) Pompa Tipi (pompa tipi)

- Gerekirse, kullanmadan önce yara bölgesini temizleyin.
- Ürünü yara bölgesine yaygın olarak uygulamak için kapağı ve pompayı çıkarın
- Yara iyileşmesi tamamlanıncaya kadar günde 1 ila 4 kez uygulayın.

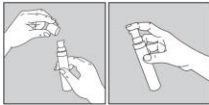

Raf Ömrü (Geçerlilik Süresi)

Üretim sonrası 3 yıl geçerlidir.

Sembol Açıklamaları



CE İşareti



Üretici



Son Kullanma Tarihi



Üretim Tarihi



Parti Numarası



Ambalaj hasarlıysa kullanmayınız



Kuru bir yerde saklayınız



Bu taraf yukarı



Avrupa yetkili temsilcisi



Dikkat



Depolama sıcaklığı (0-30)



Kullanım talimatlarına bakınız



Model Numarası



Güneş ışığından koruyunuz



Işınlama ile sterilize edildi.



EU Authorized Representative
S.B. PHARMA GMBH
Bunsenstr. 14 53121 Bonn, Germany



DAEUN MEDICAL

1404 & 1405, Sambo Techno Tower,
122, Jomaru-ro 385beon-gil,
Bucheon-si, Gyeonggi-do, Rep. of Korea
+82-32-270-6034

Distribütör:

Conmax İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varlık mah. Gaziosmanpaşa Cad. No 22
Yenimahalle / ANKARA
+903128701159

Conmax



DAEUN MEDICAL
EXPERT IN WOUND HEALING